


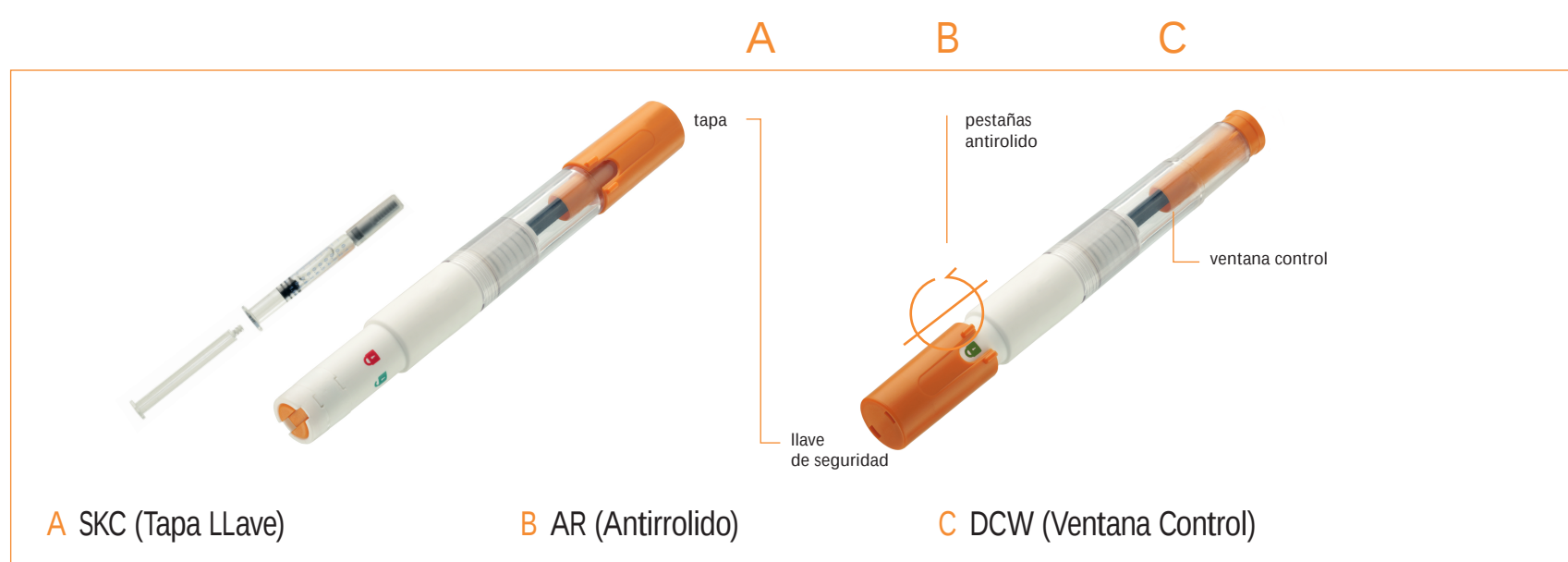

Aplicación en 4 pasos

1 Abrir dispositivo y colocar jeringa.



2 Cargar el dispositivo y cerrar.



3 Retirar la tapa llave y colocarla en el otro extremo, como llave disparadora del dispositivo.



4 Retirar el capuchón de la jeringa, girar la llave y aplicar (inyectar) el medicamento.



Para monodosis con jeringas pre-llenadas de 1 ml listas para usar con la dosis exacta.

Fácil transporte. Uso personal.

Tamaño ergonómico para aplicación manual, cómoda y precisa.

Polímeros de primera calidad altamente resistentes a caídas e impactos.

Manual de uso.